

Короткий посібник із скачування бібліотеки

zshape

1. Завантажте та відкрийте файл «3SHAPE_libraries_V1.2.zip»
2. Розпакуйте файл «MEISINGER IMPLANTS 3SHAPE libraries v1.2.dme», з компонентами бібліотеки
3. Відкрийте панель керування стоматологічною системою та перейдіть до «Інструменти» -> «Імпорт/Експорт» і виберіть «Імпорт матеріалів»
4. Тепер виберіть розпакований «*.dme» файл для імпорту
5. Готово, бібліотека Zshape тепер доступна для всіх імплантів

dental wings

1. Завантажте та відкрийте файл «Dental_wings_libraries_V1.2.zip»
2. Розпакуйте папку «Meisinger Implants DWOS V1.2» з компонентами бібліотеки
3. Запустіть програму Dental Wings та оберіть модуль «Набори імплантів»
4. На обраному модулі «Редактор наборів імплантів» клацніть правою кнопкою миші
5. Виберіть лівою кнопкою миші пункт меню «Імпорт наборів виробників імплантів»
6. Виберіть файл «Library V1.2.zip»
7. Готово, бібліотека тепер доступна для всіх імплантів

exocad

1. Завантажте та відкрийте файл «Exocad libraries V1.2.zip»
2. Відкрийте папку «Meisinger Implants EXOCAD V1.2» та розпакуйте файл «Meisinger Implants Library V1.2.zip» в папку DentalCADApp\library\implant
3. Готово, бібліотека exocad тепер доступна для всіх імплантів